

Express™ XT Intra-oral Syringe



Jednorázová stříkačka pro A-silikony



Není to pouhá stříkačka.
Je to přesnost!

Inovace
pro aplikaci
otiskovacích
krémů!

Ve stříkačce Express XT
Intra-oral Syringe zůstává
po aplikaci o **67 % méně**
než ve žlutých aplikačních
kanylách

 0,29 mm
 0,88 mm

Hlavní výhody:

- **Extrémně snadné použití**
- **Precizní aplikace**
- **Velmi hygienické použití a postup**
- **Menší odpad materiálu**

*Zaujaly vás A-silikonové otiskovací
hmoty Express XT od 3M ESPE?*

*Vyznačují se skvělou hydrofilicitou
a odolností proti roztržení!*

*Dokonale vhodné pro jedнокrokovou
i dvoukrokovou otiskovací metodu.*

Více na www.3MESPE.cz

Vyšší přesnost, snazší manipulace: získejte vše v jednom s novou aplikační stříkačkou Express™ XT Intra-oral Syringe.


Jak je možné ještě zlepšit aplikaci otiskovacího krému? Zde je odpověď: díky Express™ XT Intra-oral Syringe a jejímu unikátnímu systému automatického míchání. Tento nově vyvinutý nástroj se předplní přímo z kartuše Garant™. Je tak štíhlý, že umožňuje hladký a snadný přístup k celému sulku. A nejlepší ze všeho je, že umožňuje přesné individuální dávkování dle potřeby. Se stříkačkou Express XT Intra-oral Syringe se můžete těšit na zcela nové výhody.

Intraorální stříkačka ztělesňuje vše, co si přejete pro přípravu přesných a bezchybných A-silikonových otisků:


- Ekonomické dávkování - přesně nastavitelná dávka, žádný odpad materiálu.
- Velmi hygienická jednorázová aplikace - bez časově náročného čištění a bez potřeby dezinfekce.
- Optimální časová efektivita pro Váš každodenní pracovní režim.
- Volný výběr A-silikonového otiskovacího krému a značky.
- Přesná regulace množství potřebného materiálu.
- Méně zbytkového odpadu v kanyle v porovnání s běžnými pistolovými dispenzery.

3M ESPE


Jak to funguje:

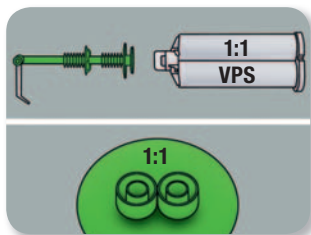


1

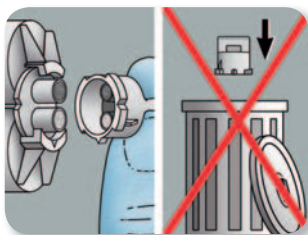


2

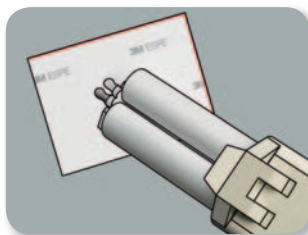


3

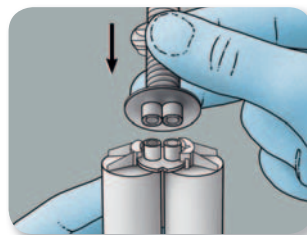


4

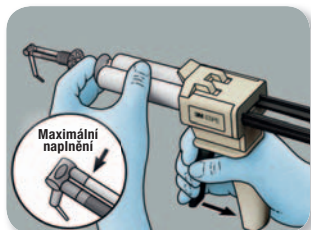


5

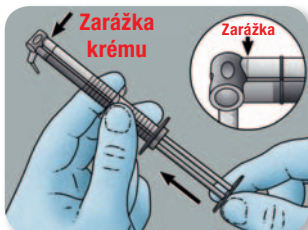

6

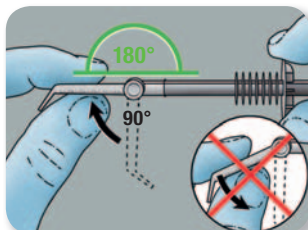

7

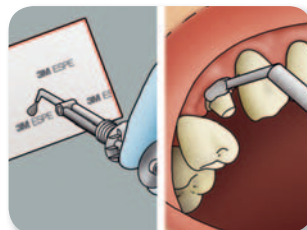


8

Užitečné tipy:

Množství náplně na

3–4 zuby/2–3 zuby/1–2 zuby

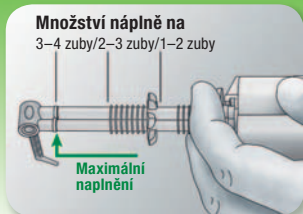


Maximální
naplnění

Přeplněno

Při přeplnění se pojistný ventil otevře pro přebytek

Maximální
naplnění

Očistit před použitím!

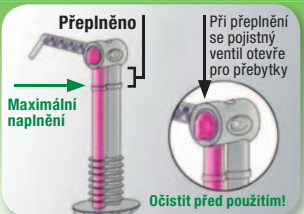

„Nová koncovka na aplikaci otiskovacích krémů Express™ XT Intra-oral Syringe je produkt, který zvýšil kvalitu mých otisků.“

Díky této koncovce mohu nanášet krém na obroušené zuby pouze lehkým tlakem, takže mám lépe pod kontrolou polohu špičky aplikátoru a její kontakt se zubem během vytlačování otiskovací hmoty. Toto mi chybělo při nanášení krému aplikátorem Garant Dispenser. Otisk je nyní obvykle **bez bublin a s přesným zobrazením okrajů preparace**. Rád jsem intra-oral syringe vyměnil za míchací kanylu a aplikační špičku.“

MUDr. Daniel Svoboda, DVDent spol. s r.o. Vědomice



Express™ XT Intra-oral Syringe doplňkové balení (71483)



Express™ XT Regular Body doplňkové balení (36975)

Informace pro objednání:

Obj. č. Informace o produktu

71483 Express™ XT Intra-oral Syringe doplňkové balení
20 intra-orálních stříkaček

A-silikonové otiskovací krémy

Obj. č. Informace o produktu

36974 Express™ XT Light Body doplňkové balení, 2 kartaše à 50 ml

36976 Express™ XT Light Body Quick doplňkové balení, 2 kartaše à 50 ml

36975 Express™ XT Regular Body doplňkové balení, 2 kartaše à 50 ml

36977 Express™ XT Regular Body Quick doplňkové balení, 2 kartaše à 50 ml

36799 Express™ Ultra-Light Body doplňkové balení, 4 kartaše à 50 ml

3M ESPE

3M Česko, spol. s r. o.
V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
Tel.: 261 380 111, 113
Fax: 261 380 110
E-mail: 3MCesko@3M.com
www.3MESPE.cz

www.3MESPE.cz

3M, ESPE, Express a Garant jsou registrované ochranné známky 3M nebo 3M Deutschland GmbH. Used under license in Canada.
© 2012, 3M. Všechna práva vyhrazena.