

# Filtek™ Bulk Fill Zátékavý kompozit



# Bulk Fill

## Dostatečně pevný,

## aby nesl jméno Filtek™

### Hlavní výhody:

- Až o **50% pevnější** než přední bulk fill kompozit<sup>1</sup>
- Téměř **dvojnásobná odolnost proti opotřebení** oproti předním bulk fill kompozitům<sup>2</sup>
- Výběr z dávkovacích systémů: **kompule nebo tuby**
- Zátékavá konzistence **usnadňuje dosažení dobré adaptace**

1. V porovnání k SDR™ 2. In vitro data ve spisu



Zátékavý kompozit Filtek™ Bulk Fill může být aplikován v jednom 4mm inkrementu.

Zdroj: Interní data 3M ESPE


Trend rychlejších a jednodušších postupů neustále roste. Společnosti 3M ESPE, která je lídrem v oblasti dentálních výplňových materiálů, se podařilo nejen zlepšit samotný „bulk fill“ postup, ale také zajistit dosažení kvalitních výsledků – s kompozitním materiálem Filtek™ Bulk Fill.

Snadno se dávákuje a aplikuje. A nabízí důležité vlastnosti:


- **4 mm hloubka vytvrzení** – snižuje potřebu postupného vrstvení v inkrementech a riziko kontaminace
- **Nižší napětí**, čímž umožňuje hromadnou aplikaci a pomáhá snižovat riziko vzniku pooperační citlivosti
- **Dobrá okrajová adaptace**
- **Zátékavá viskozita pro snazší adaptaci na povrch kavity** – vyžaduje tak méně manipulace s nástroji

Pro snazší postup bez kompromisů je tu zátékavý kompozit Filtek Bulk Fill.

### Vyšší vztlková pevnost v porovnání s předními bulk fill kompozity

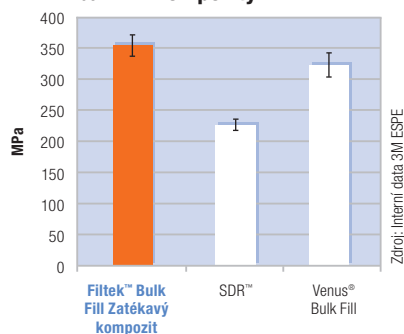

### Lepší odolnost proti opotřebení oproti předním bulk fill materiálům (3-bodový test, in vitro)

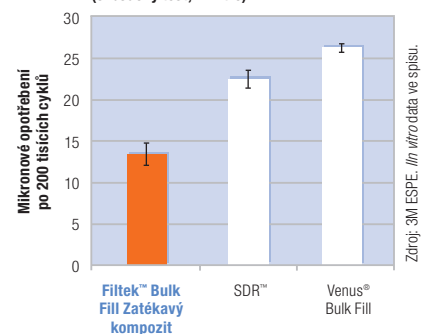

**3M ESPE**

# Pro rychlé a snadné výplně v postranním úseku je tu Filtek™ Bulk Fill.



1  
 Preparujte zub a aplikujte adhezivum, např. Single Bond Universal od 3M ESPE.

Klinické fotografie s laskavým svolením Dr. Reich, Seefeld, Německo



2  
 Do připravené kavity dávkujte až 4 mm zatékavého kompozitu Filtek™ Bulk Fill a zpolymerujte.



3  
 Aplikujte 2 mm (minimum) finální vrstvu estetického kompozitu, např. kompozitu Filtek™ Ultimate, a vytvrdte.

**INDIKACE** • Báze pod přímé výplně třídy I a třídy II • Podložka pod výplňové materiály • Pečetění jamek a fisur

## Informace pro objednání:

### Doplňková balení

ODSTÍNY	TUBY	KOMPULE
A1	4862A1	4861A1
A2	4862A2	4861A2
A3	4862A3	4861A3
Universal	4862U	4861U

Doplňková balení **TUBY** obsahují 2 tuby à 2g, 20 aplikačních koncovek, obrázkový postup a návod k použití.

Doplňková balení **KOMPULE** obsahují 15 kompulí à 0,2 g, obrázkový postup a návod k použití.

Obj. č.	Informace o produktu
3740T	<b>Filtek™ Bulk Fill Aplikační koncovky</b> 20 oranžových aplikačních koncovek



Filtek™ Bulk Fill Flowable  
Doplňkové balení - kompule

Filtek™ Bulk Fill Flowable  
Doplňkové balení – tuby

**TIP!** 3M ESPE doporučuje použití v kombinaci s adhezivem:

**Single Bond Universal**  
Skutečně univerzální adhezivum pro self-etch, selective-etch i total-etch techniku



Pro více informací a možnost osobně si produkty vyzkoušet volejte naše obchodní zástupce:

**Kristýna Kopelentová**, obchodní zástupkyně pro Čechy  
Tel.: 725 845 704, E-mail: KKopelentova@mmm.com

**MVDr. Michael Stiksa**, obchodní zástupce pro Moravu  
Tel.: 725 500 423, E-mail: MStiksa@mmm.com

Podrobné informace o výrobcích 3M ESPE najdete na



**3M ESPE**

3M Česko, spol. s r.o.  
V Parku 2343/24  
148 00 Praha 4  
E-Mail: 3MCesko@3M.cz  
Internet: www.3MESPE.cz

3M, ESPE, Adper a Filtek jsou registrované ochranné známky 3M nebo 3M ESPE AG.

Použito v licenci Kanady. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastněny jinými společnostmi.

© 2012, 3M. Všechna práva vyhrazena.